



Rolstoel rijden met een elektrische ondersteuning

“ZO HEB IK GEEN ELEKTRISCHE ROLSTOEL NODIG! EN IK BEN ACTIEVER EN MOBIELER.”

Heeft u niet meer genoeg kracht of energie om een helling op te komen? Of om alleen of samen langere afstanden af te leggen met uw rolstoel? Wordt u van rolstoel rijden snel moe of krijgt u pijn in uw schouders of armen? Dan is een elektrische ondersteuning wellicht iets voor u, om het rollen of duwen te verlichten. Of om met uw lichte, handbewogen rolstoel volledig elektrisch aangedreven te rijden. Een elektrische ondersteuning past op bijna iedere handbewogen rolstoel. Een perfect alternatief voor een elektrische rolstoel of scootmobiel.

Wat is voor u belangrijk bij de keuze voor een elektrische ondersteuning?

- Ondersteuning die u nodig heeft: zoekt u ondersteuning bij het zelf rollen, wilt u volledig elektrisch rijden of heeft uw partner of begeleider duwondersteuning nodig?
- Bediening met hoepels, joystick, duwstang of hendel
- Rijgemak en draaicirkel van de rolstoel met een elektrische ondersteuning
- Gemak van het aan- en afkoppelen en het meenemen van de elektrische ondersteuning
- Gewicht van de elektrische ondersteuning inclusief accu
- Laadgemak, het aansluiten en opladen van de accu
- Afstand die u met de elektrische ondersteuning wil afleggen



Kies uw elektrische ondersteuning van Alber

	smoov	e-motion M25	e-motion M25 Duo Drive	e-fix E35/36	e-fix E35/E36 met begeleidersbediening	via GO V24	viamobil V25	e-pilot P15
Ondersteuning bij	Volledig elektrische ondersteuning, wel zelf remmen en sturen	Zelf rollen, krachtondersteuning	Zelf rollen met krachtondersteuning, volledig elektrische ondersteuning mogelijk dan ook met hoepels sturen en remmen	Zelf volledig elektrisch rijden	Zelf volledig elektrisch rijden en duwen (ondersteunt ook bochten)	Duwen	Duwen en remmen	Zelf volledig elektrisch rijden
Bediening	Hoepels en bedieningsunit	Hoepels	Hoepels en mobiele telefoon	Joystick	Joystick en duwbediening op handvat	Activeren met duimbediening	Duwstang of duwbediening op handvat	Gas geven met handvat
Rijgemak	○○○○○	○○○○○ (ondersteuning instelbaar, binnen- en buitenstand)	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Gemak aan- & afkoppelen	○○○○○ (1 beweging aan achteras klikken)	○○○○○ (geen losse accu)	○○○○○ (geen losse accu)	○○○○○	○○○○○	○○○○○ (geen losse accu)	○○○○○ (geen losse accu)	○○○○○
Gewicht	7,2 kg	7,8 kg per wiel (incl. accu)	7,8 kg per wiel (incl. accu)	Totaal: 18,9 kg Zwaarste onderdeel: 7,8 kg	Totaal: 18,9 kg Zwaarste onderdeel: 7,8 kg	Totaal: minder dan 6 kg	Totaal: 13,5 kg Zwaarste onderdeel: 10,5 kg	Totaal: 18,4 kg
Laadgemak accu	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Max. snelheid	6 / 10* km/u	6 / 8,5* km/u	6 / 8,5* km/u	6 / 8* km/u	6 km/u	5,5 km/u	5,5 km/u	20 km/u
Afstand**	20 km	25 km	25 km	14 – 22 km	14 – 22 km	16 km	20 km	50 km

* Te bereiken met optionele Mobility Plus Pakket

** Afhankelijk van de versie, ondergrond, het gewicht van de gebruiker, de temperatuur, rolstoelinstellingen en route

Legenda: Mate van aanwezigheid productkenmerk: ○ matig ○○ redelijk ○○○ goed ○○○○ zeer goed ○○○○○ uitstekend

Stappen naar een succesvolle aanvraag van uw elektrische ondersteuning

U weet zelf het beste wat u nodig heeft en welk hulpmiddel bij u past. Kies daarom uw hulpmiddel zelf en vraag dat daarna aan bij het WMO-loket van uw gemeente. Daar kunt u altijd hulp bij inroepen, bijvoorbeeld van uw ergotherapeut of de producent van het hulpmiddel. De regels veranderen regelmatig en verschillen tussen gemeenten. Vraag daarom goed door naar de regels in uw gemeente en leg afspraken vast, om uw kans op een vergoeding van het hulpmiddel van uw keuze het grootst te maken.

1. Heeft u extra ondersteuning nodig? Schrijf zelf een indicatie waaruit blijkt dat u elektrische ondersteuning nodig heeft

Met een indicatie (soms ook persoonlijk plan genoemd) toont u aan dat u met elektrische ondersteuning zelfstandig kan functioneren, eventueel samen met uw partner. Bij een indicatie gaat het er alleen om dat u het hulpmiddel nodig heeft, en nog niet om het specifieke merk en type. Een indicatie kunt u het beste zelf schrijven, want u weet wat u nodig heeft. U kunt hulp inroepen van uw ergotherapeut, een producent of de gemeente. De gemeente kan ook een indicatie (laten) schrijven. De gemeente moet binnen 6 weken schriftelijk op een indicatie reageren (WMO Artikel 2.3.2).

2. Kies zelf de elektrische ondersteuning die het beste bij u past

Welke elektrische ondersteuning heeft u nodig? Welke variant, merk en type passen het beste bij u? Ga op onderzoek uit en win advies in bijvoorbeeld bij uw ergotherapeut en diverse aanbieders. Maak een overzicht met opties, plussen en minnen en kies daarmee zelf de beste elektrische ondersteuning voor u.

3. Heeft u al een ander elektrisch vervoermiddel? Ga na of uw gemeente meerdere elektrische vervoermiddelen vergoedt

Gebruikt u al een ander elektrisch vervoermiddel, zoals een scootmobiel? Sommige gemeenten vergoeden maar één elektrisch vervoermiddel. Goed om vooraf na te vragen. Mocht er maar één elektrisch vervoermiddel worden vergoed, dan kan u er ook voor kiezen het duurste te laten vergoeden en de goedkoopste zelf aan te schaffen.

4. Ga na of uw keuze binnen het WMO-aanbod van de gemeente valt

Gemeenten hebben contracten met vaste leveranciers. Het aanbod dat binnen de WMO via zogenaamd 'Zorg in natura' wordt vergoed, is daarom beperkt. Valt uw keuze binnen het aanbod? Vraag uw elektrische ondersteuning aan. Zo niet, ga naar stap 5 om de elektrische ondersteuning van uw keuze aan te vragen. Eventueel met hulp van uw ergotherapeut of de producent van het hulpmiddel van uw keuze.

5. Vraag de elektrische ondersteuning van uw keuze aan met een sterke onderbouwing

Als uw keuze niet binnen het standaard aanbod van uw gemeente valt, vraagt u de elektrische ondersteuning van uw keuze aan. Uw kans op een toekenning is groter met een sterke onderbouwing. U maakt uw onderbouwing sterker met advies van uw ergotherapeut en met een overzicht van de mogelijkheden (zie stap 2) met daarbij één of meerdere offertes. U kunt de producent van uw hulpmiddel ook vragen u hierbij te helpen. Keurt de gemeente uw aanvraag af, dan kunt u een PGB aanvragen (zie stap 6).

6. Vraag een Persoons Gebonden Budget (PGB) aan

Vraag een PGB aan met een goed gemotiveerde onderbouwing. Toon aan dat u een kwalitatief hulpmiddel aanschaft en dat u goed in staat bent het hulpmiddel zelf aan te schaffen, gebruik-en en (laten) onderhouden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, wilt u de elektrische ondersteuning uitproberen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan contact met ons op **0318 69 57 57 - communicatie@invacare.com - www.invacare.nl**