

Alber | **viamobil[®] eco V14**



Duwen zonder inspanning

Het intelligente **ErgoDrive** concept van de **viamobil eco** zorgt ervoor dat de rolstoel uitermate ergonomisch en moeiteloos voort de duwen en af te remmen is. Om vooruit en achteruit te rijden, hoeft u slechts de duwstang licht in te drukken of omhoog te trekken. Het is voor een ieder eenvoudig te leren. Ook de overige functies van de viamobil eco zijn eenvoudig te bedienen.





ErgoDrive - Eenvoud en effectiviteit

Dankzij het intelligente **ErgoDrive** concept is het voortduwen en afremmen van de rolstoel nu kinderspel geworden. Een sensor in de duwstang bemerkt dat de begeleider de rolstoel wil voortduwen en activeert het rijmechanisme. Wanneer de duwstang naar beneden wordt gedrukt, rijdt de rolstoel naar voren. Wanneer de duwstang omhoog wordt getrokken, rijdt de rolstoel achteruit.

Alles onder controle

Het bedienen van de **viamobil eco** is eenvoudig door het gebruik van een draaiknop. Hiermee kan de motor aan- of uitgeschakeld worden, kan de snelheid worden bepaald en kan de vrijloop ingeschakeld worden.

Het intelligente veersysteem garandeert een comfortabele en stille rit, geheel automatisch worden de oneffenheden in de weg gecompenseerd.

Bovendien is de **viamobil eco** een veilige partner bij een bergafwaarts traject. De automatische remfunctie zorgt voor het veilig tot stilstand brengen van de rolstoel.

Draagbaar en breed toepasbaar

In enkele seconden is de **viamobil eco** zonder gereedschap te demonteren in drie compacte onderdelen die in elke kofferbak passen. De **viamobil eco** is eenvoudig te combineren met de meeste standaard rolstoelen en is, dankzij

het slimme koppelsysteem, zonder gereedschap en in een handomdraai te bevestigen aan de rolstoel. De hoogte van de duwstang is in te stellen al naar gelang de lengte van de begeleider.

Eigenschappen en opties



De compacte en lichtgewicht componenten zijn eenvoudig te vervoeren.



ErgoDrive
De gepatenteerde **ErgoDrive** duwstang is ideaal voor het voortduwen van rolstoelen.



Met de draaiknop kunnen alle functies worden overzien en met één hand worden bediend.

Eigenschappen en opties



Aandrijfunit met massieve banden, innovatieve vering en voetpedaal om het wiel omhoog en omlaag te bewegen.



Automatische acculader met indicatie lichtjes. Laadt de accu in zeven uur op.



Accu-pack is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. Met laad-aansluiting.



Eenvoudig aan de rolstoel te bevestigen.



Anti-tippers normaliter aanbevelen, voor hellingen van meer dan 8% verplicht.










Bevestigingsbrackets verkrijgbaar voor vele types rolstoelen.



Autolader om het accupack op te laden in de auto, 12 - 32 volt. Met automatische uitschakeling.

Technische gegevens

							
viamobil eco	max. 5,5 km/u	12 km*	24V/9 Ah	6 kg	10%	19 kg (drive unit: 10,5 kg)	120 kg

* De actieradius varieert al naar gelang het terrein waarover wordt gereden en de heersende rijomstandigheden. Wanneer de rijomstandigheden optimaal zijn (vlak terrein, recent opgeladen accu's, een omgevingstemperatuur van 20° C, gelijkmatig rijgedrag) kan de opgegeven actieradius worden gehaald.